


mypen[®]2

Caneta de Insulina Reutilizável

Companheira para o Controle do Diabetes

Para ser usada apenas com carpule de insulina de 3 mL de Wockhardt

Insulina Humana injetável 100 UI/mL
Insulina Iofana injetável 100 UI/mL
Insulina Iofana Bifásica injetável 100 UI/mL
Insulina Glargina injetável 100 UI/mL
origem r-DNA

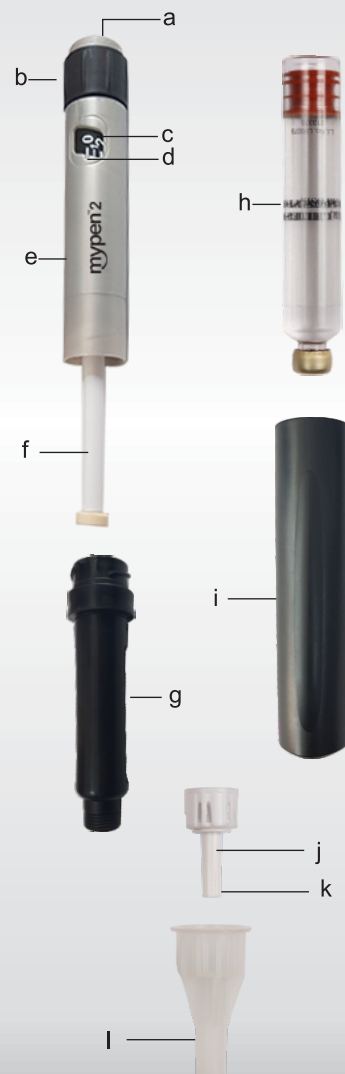

COMPONENTES

- a. Êmbolo
- b. Seleção de dose
- c. Janela de exibição da dose
- d. Indicador de dose
- e. Corpo da caneta
- f. Êmbolo interno
- g. Suporte do carpule
- h. Carpule*
- i. Tampa da caneta
- j. Agulha*
- k. Tampa da agulha*
- l. Tampa de proteção*

*Carpule, Agulha, Tampa da agulha e Tampa de proteção (não incluídas nesta embalagem; os detalhes são fornecidos apenas para fins de **instruções de uso**)

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher mypen[®]2

mypen[®]2 é uma caneta para aplicação de insulina fácil de usar, projetada para administrar insulina a partir de um carpule de 3mL.

mypen[®]2 pode administrar doses de 1-60 unidades em acréscimos de 1 unidade.

Por favor, leia esse manual de instruções passo a passo com atenção antes de usar **mypen[®]2**.

Antes de usar a agulha, verifique a data de validade impressa na sua embalagem.

COMEÇANDO

1. Remova a tampa da caneta e desparafuse o corpo da caneta do suporte do carpule.



2. Certifique-se de que o êmbolo interno esteja totalmente retraído. Caso o êmbolo interno não esteja totalmente retraído, por favor, consulte a etapa 15.



3. Verifique sempre se está usando o tipo correto de insulina. Coloque o carpule de insulina no suporte, introduzindo pelo lado da tampa metálica.

Se estiver usando Insulina Suspensão, você precisará ressuspender a insulina girando o carpule para cima e para baixo e rolando suavemente entre as palmas das mãos.



4. Conecte firmemente o suporte do carpule e o corpo da caneta.



PREPARAÇÃO E INJEÇÃO

5. Remova o selo protetor externo da agulha e prenda-a firmemente, enroscando-a na extremidade do suporte do carpule. Pode-se usar agulha 32G 4mm para injeção.


Use uma agulha nova em cada dose de injeção



6. Remova o selo protetor externo e a tampa da agulha.



Se estiver usando Insulina Suspensão, vire a caneta para cima e para baixo pelo menos 10 vezes. Em seguida, coloque a agulha na caneta.

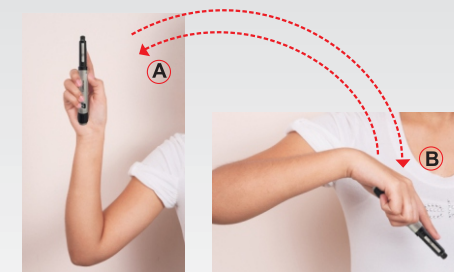

É importante preparar a mypen[®]2 antes de usar para remover qualquer bolha de ar que possa estar dentro da agulha.

7. Selecione 2 unidades usando o seletor de dose. A janela de exibição da dose mostra a quantidade de insulina selecionada.



8. Segure a mypen[®]2 com a agulha apontada para cima. Bata levemente com o dedo no suporte do carpule algumas vezes para levantar quaisquer bolhas de ar para a parte superior do carpule.

1

2

3

4

9. Empurre o êmbolo completamente e o indicador de dose retornará a 0 (zero). Uma gota de insulina aparece na ponta da agulha.

Repita os passos de 7 a 9 até que uma gota de insulina apareça no topo da agulha, garantindo a expulsão de bolhas de ar.



mypen®2 está pronta para uso.

10. Certifique-se de que o indicador de dose esteja marcando 0 (zero) unidades. Selecione a quantidade necessária de insulina girando o seletor de dose. O número que aparece na frente do indicador de dose indica a quantidade de insulina selecionada por você.



Caso você selecione mais unidades do que as recomendadas, basta girar o seletor de dose na direção oposta ao desejado.

11. Insira a agulha no local da injeção usando a técnica de insulina recomendada pelo médico. Empurre o êmbolo completamente.



5

12. Conte até 10 e retire a agulha da pele. Recoloque a tampa protetora branca externa da agulha e remova-a. Recoloque a tampa da caneta na mypen®2.

Antes de fazer injeções subsequentes, certifique-se sempre de estar usando uma nova agulha, de que a caneta esteja preparada e que uma gota de insulina esteja presente na ponta da agulha, conforme mencionado nas etapas 5 a 9.

13. Se não houver insulina suficiente no carpule para a dose total, você poderá ver o número de unidades que ainda precisa injetar no indicador de dose. Você deve sempre verificar isso depois de aplicar a injeção

MUDANÇA DE CARPULE

14. Para trocar o carpule, desenrosque e remova o suporte do carpule do corpo da caneta. Remova o carpule com cuidado.



15. Para retrainr o êmbolo interno, segure-o firmemente e gire o corpo da caneta no sentido horário até que ele esteja totalmente retraído. O êmbolo interno também pode ser retraído empurrando a ponta branca com a pressão do polegar.

Siga a etapa 3 para carregar o carpule.



6

Armazenamento

A mypen®2 deve ser sempre guardada ou transportada tampada e sem agulha.

Para limpar a mypen®2, limpe o corpo com um pano limpo e úmido.

Não mantenha mypen®2 na geladeira entre as injeções.

Não congele a mypen®2.

Por favor, verifique a bula da insulina para obter informações sobre o armazenamento quando em uso com um carpule de insulina.

Descarte

Não jogue fora a caneta junto com seu lixo doméstico. Descarte a sua caneta conforme as instruções do profissional de saúde ou autoridades locais.

O fabricante não pode ser responsabilizado por quaisquer problemas com sua mypen®2 caso as instruções não tenham sido seguidas.

Validade:

mypen®2 é válida para uso até 3 anos a partir da data do primeiro uso.

"mypen®2 atende aos requisitos funcionais e de precisão de dose da ISO 11608-1 com o carpule de 3 mL da Wockhardt."

7

Precauções importantes de segurança

O não cumprimento destas instruções pode resultar em uma dose imprecisa.

- Sempre verifique, antes de cada aplicação, se o carpule de insulina na mypen®2 contém a quantidade correta de insulina a ser usada.
- Sempre expulse o ar com a agulha voltada para cima antes de cada aplicação.
- A agulha deve ser removida e descartada com segurança imediatamente após cada aplicação, e a caneta deve ser guardada sem agulha. Isso previne contaminação, infecção, vazamento de insulina e garantirá uma dosagem precisa.
- Seu médico prescreveu o tipo de insulina que ele acredita ser o melhor para você. Não use outra insulina, exceto por conselho e orientação do seu médico.
- Verifique o conteúdo da embalagem conforme listado na parte externa da caixa.

Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2023/000624



Fabricado por
WOCKHARDT LIMITED
Biotech Park, H-14/2, MIDC, Waluj,
Aurangabad 431136,
Maharashtra State, India

® Reg. Marca registrada de Wockhardt na Índia
Tecnologia patenteada pela Wockhardt Limited na Índia
Para mais detalhes sobre Dieta & Diabetes, visite
www.wockhardtdiabetic.com

Nº lote, data de fabricação: vide embalagem

Importado por:

Gerais Com. e Imp. de Materiais e Equipamentos Médicos Ltda

Rua do Ouro, 1488 Sala 01 Letra B / Bairro Serra
CEP: 30210-590 – Belo Horizonte – MG
CNPJ: 04.491.780/0001-70

Registro ANVISA: 80410389002

Farmacêutica Responsável: Rachel B. de Castilho
CRF-MG: 9821



0800 701 0450

mypen®2

Caneta de Insulina Reutilizável

Companheira para o Controle do Diabetes



11/10157 227877

WOCKHARDT